

Mode d'emploi

A) Limitation d'angle

Régler selon les prescriptions du médecin.

Réglage standard:

Réglage maximum 9 (90°)

Réglage minimum 0 (0°)



B) Longueur de la coque

Ajuster la longueur de la coque



C) Positionner le curseur

Déverrouiller en appuyant et déplacer dans la position souhaitée.

Position de base: Voir illustration positionnement de l'appareil



1. Positionnement de l'appareil

- Positionner CAMOPED entre les jambes du patient, les pieds de l'appareil repliés.
- Distance entre l'appareil et le bas du dos du patient: environ 10 cm.
- Déplier les pieds de CAMOPed.

2. Placement de la jambe blessée

- Placer la jambe blessée dans la coque, dans la position d'extension tolérée.
- Fermer les sangles.


Attention: vérifier au préalable que les curseurs orange sont ajustés et fixés correctement.

3. Placement de la jambe saine

- Placer la jambe saine dans la coque.
- La jambe blessée reste en extension, la jambe saine est fléchie.
- Fermer les sangles.

4. Commencement des exercices

- Commencer les exercices de motricité.
- Tout d'abord, faire bouger la jambe blessée à l'aide de jambe saine.
- Dans la phase ultérieure, bouger activement la jambe blessée.

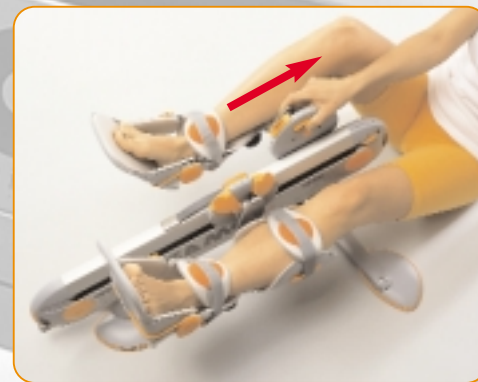

CE Attention: CAMOPED ne peut être utilisé que sur ordonnance!

Si nécessaire: déverrouiller le curseur et positionner la jambe dans la position de flexion maximale.

Si nécessaire: augmenter la résistance au mouvement si cela a été prescrit par le médecin.