

Instrucciones de uso

VACO®diaped

Introducción

Con VACO®diaped tiene a su disposición un concepto terapéutico para el cuidado ortésico del Síndrome del Pie Diabético, con una curación de las ulceraciones del pie diabético muy rápida y que permite, al mismo tiempo, movilizar al paciente lo antes posible. Favorece la curación de las excoriaciones gracias a una distribución regular del peso por medio de un sistema de cojín de vacío que se adapta anatómicamente y por igual a la extremidad sin provocar picos de presión. Una carcasa exterior con estructura circular de reja estabiliza la pierna y el pie y procura de que se reduzcan de un modo óptimo las fuerzas axiales de la pisada en la planta del pie al caminar. Un diseño de suela adaptado al "Síndrome del Pie Diabético" hace que el pie descanse cómodamente y a la vez mantenga su estabilidad. De esta manera resulta caminar de manera muy fisiológica con una seguridad máxima durante el tratamiento.

Estas instrucciones de uso le ayudarán a utilizar el sistema de un modo óptimo. En nuestra página web www.vacodiaped.com encontrará una demostración en vídeo que le enseñará cómodamente su utilización en unos sencillos pasos.

Características del producto

- Sin presión, rápido y reversible
- Ajustable gracias al cojín de vacío
- Posibilidad permanente de acceso para controlar las excoriaciones
- Inmovilización del pie en una postura estable
- Imagen de marcha normal gracias a la suela redondeada
- Totalmente permeable a los rayos X
- Sirve tanto el pie derecho como para el izquierdo, en dos tamaños

Consejos para un eficaz y sin complicaciones

Advertencias generales para diabéticos

1. Preste atención especial a sus pies. Compruebe siempre la percepción de sensaciones en sus pies.
2. Controle diariamente los cambios o heridas de sus pies. Ayúdese de un espejo o pida ayuda a alguien cercano.
3. Cuide varias veces al día la piel seca de los diabéticos con productos específicos. Consulte con su médico o con un pedicuro médico.
4. Lávese los pies al menos una vez al día con agua templada y después séquelos minuciosamente. Preste especial atención a los espacios interdigitales.
5. Tome el baño de pies por un tiempo no superior a 3 minutos para evitar que la piel se reblandezca.
6. Póngase en manos de un especialista para retirar sus callos, a ser posible vaya regularmente a un pedicuro.
7. No se corte las uñas usted sólo si no tiene buena vista; es preferible que le ayude alguien cercano o que vaya a un pedicuro.
8. Límesse las uñas de los pies rectas y redondee un poco los bordes que tocan con los otros dedos.
9. No camine descalzo.

Indicaciones especiales para el tratamiento con VACO®diaped

1. Cambie al menos cada dos o tres días la funda del cojín de vacío.
2. Renueve cada dos o tres días el vacío, preferiblemente cuando cambie la funda.
3. No camine nunca sin su VACOdiaped, incluso en casa.
4. Le rogamos que cumpla las indicaciones de su médico.

Problemas y solución

Marcas de presión

Repita de nuevo el proceso de ajuste desde el principio. Reparta uniformemente el relleno del cojín, especialmente en las zonas en las que tenga marcas de presión.

El cojín de vacío está demasiado duro

Tire de la anilla coloreada de la válvula y muévelo a un lado y al otro para que el aire pueda entrar.

Resulta muy difícil ponerse el cojín

Antes de ponerse el cojín, déle forma bombeando 6 u 8 veces (véase funciones de la válvula). El cojín ganará rigidez y le permitirá ponérselo con más facilidad. Después de haberse puesto el cojín, tire de la anilla de la válvula para que pueda entrar aire en el mismo.

No se puede poner la suela

Doble la suela hasta que su superficie de marcha quede ligeramente doblada hacia fuera. Coloque de nuevo la suela.

Advertencias de seguridad

Compruebe que la suela queda fijada firmemente y no camine nunca sin ella - PELIGRO DE DESLIZAMIENTO!

Valor indicativo/número del zapato

Small (Pequeño)	35-39
Standard (Estándar)	39-46

Información adicional

Si tiene más preguntas diríjase a su proveedor o directamente a OPED. También puede visitar nuestra página web:

www.vacodiaped.com

OPED

OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Germany

Fon +49 (0)8024/60 81 82-10
Fax +49 (0)8024/60 81 82-99
mail@oped.de
www.oped.de

OPED España
Antonio Ortopedia S.L.
Camino Albero 28
29649 Mijas Costa/Málaga
Spain

Fon/Fax +34 (0)952 47 04 08
Movil +34 (0)678 94 45 81
opedes@hotmail.com
www.oped.es

Instrucciones de uso

VACO®diaped

Proceso de colocación I



Abra la válvula del cojín (v. funciones de la válvula) y retire la carcasa anterior. Coloque el pie en el zapato interior y cierre las bandas autoadherentes. Después coloque el pie con el zapato interior en la carcasa.

Proceso de colocación II



Coloque la carcasa delantera y cierre las correas. Conduzca las correas desde abajo a través de las hebillas. Se recomienda seguir el orden que muestra la ilustración. Para un ajuste óptimo debe caminar algunos pasos.

Proceso de colocación III

Presione la anilla de la válvula; de forma del cojín bombeando varias veces. Retire la bomba y cierre el tapón de la válvula. En caso de necesidad apriete las correas.




Funciones de la válvula



Ablandar el cojín de vacío:
Tire de la anilla de la válvula y muévelo al mismo tiempo para que pueda entrar el aire



Endurecer el cojín de vacío:
Presione la anilla de la válvula y haga vacío con la bomba - Fije el ajuste

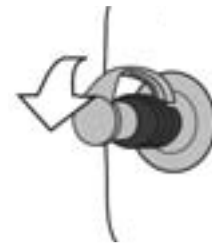

Cerrar el tapón de la válvula:
Asegure el vacío

Cambiar la funda del cojín




Tire de la anilla de la válvula para que pueda entrar el aire y el cojín se ablande (v. Funciones de la válvula). Abra completamente la cremallera de la funda y saque el cojín de vacío.




Coloque el cojín plano y reparta uniformemente el relleno. Introduzca el cojín por las cremalleras abiertas en las bolsas laterales de la funda limpia y saque la válvula a través del ojal.

Montar y cambiar la suela

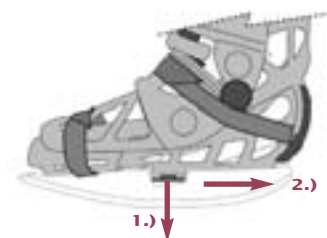

Quitar: Tire a la vez de las dos palancas hacia abajo (1.), a continuación empuje hacia atrás la suela y quítela (2.).

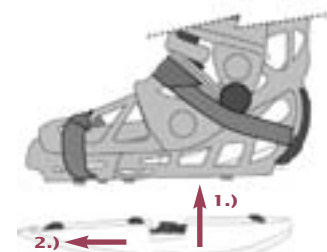

Colocar: Ponga la suela como muestra la ilustración (1.) y a continuación empújelo hasta que oiga como encaja (2.) Compruebe que la suela queda fijada firmemente y no camine nunca sin ella - PELIGRO DE RESBALAR!

Colocar el separador

Línea de guía



El separador le permite ganar más espacio en la carcasa posterior (dorsal) en caso de tobillos muy hinchados.


- Coloque el separador (como se ve en la imagen) siguiendo la línea guía de la carcasa dorsal
- Presione el separador por el centro, con ambos pulgares y las palmas de la mano hacia atrás hasta que se perciba que ambas partes están encajadas

Retirar el separador



- Desde un lado, presione hacia atrás con los pulgares la pestaña de cierre a la vez que se empuja con el índice y el corazón contra el borde exterior.
- Repita la operación en el otro lado
- Retire el separador

Cambiar la plantilla

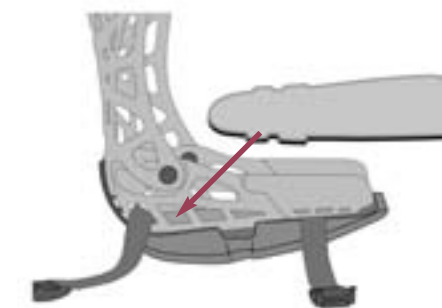

Retirar la suela usada.

Colocar la nueva suela con la parte dura y oscura hacia abajo. Compruebe que las pestañas de la suela encajan en los huecos de la carcasa.

Limpieza y cuidado

Carcasa y correas

Lavarlas con los zapatos de quirófano o en lavavajillas a 60° (cerrar antes la carcasa con las correas).

Fundas de terciopelo

Son de poliamida y se pueden lavar a máquina a 60°C (cerrar primero las cremalleras) Por razones de higiene cada paciente recibe dos fundas de terciopelo. El cojín de vacío no se puede lavar con la funda. Le rogamos que retire antes el cojín de vacío.

Cojín de vacío

Cada paciente recibe un cojín de vacío nuevo. El cojín puede lavarse con agua jabonosa.

Control de fisuras y roturas

Antes de cada utilización comprobar visualmente si existen fisuras o roturas. En caso de fisuras/roturas o desgaste excesivo, la carcasa debe cambiarse.

Almacenamiento

En un lugar seco y sin polvo; temperatura de 5 a 25°C