

Bedienungsanleitung

VACO[®]hand

Einleitung

VACO[®]hand ist ein Fraktur-Management-System das für die Behandlung von Radiusfrakturen entwickelt wurde. Sicherheit und Patientenkomfort sind durch einfache reversible Anpassung des Vakuumkissens gewährleistet. Das ermöglicht zusammen mit einer stabilen Gitterschale die komplette Behandlung mit einem System (von der prä- und postoperativen Lagerung, über gipsstabile Fixierung bis zu funktioneller Orthese).

Indikationen

- **VACO[®]hand radius**
Radiusfrakturen
- **VACO[®]hand pollex**
Scaphoidfrakturen
Rhizarthrose-OP

Größen

Small, Standard und X-Large jeweils für linken oder rechten Arm erhältlich

Weitere Informationen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder OPED direkt.

OPED

OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Germany

Fon +49 (0)8024 / 60 81 82-10
Fax +49 (0)8024 / 60 81 82-99
mail@oped.de
www.oped.de

OPED AG
Sumpfstraße 5
6312 Steinhausen
Switzerland

Fon +41 (0)41 / 748 53 35
Fax +41 (0)41 / 748 53 40
contact@oped.ch
www.oped.ch

Bedienungsanleitung

VACO[®]hand


Vorbereitung

- Armbezug (Stoff) anlegen
- Auf möglichst faltenfreien Sitz achten

Schale vorbereiten

- Gurte der Schale öffnen
- Die Laschen weit öffnen

Bild 1

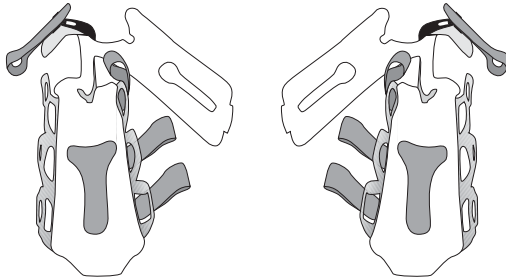

Für linken Arm

Für rechten Arm

Kissen vorbereiten


- Obere Kissenhälfte aufklappen (Bild 1)
- Bei ungleichmäßiger Kugelverteilung farbigen Ventilring nach oben ziehen, bis Luft einströmt und Kissen weich wird
- Kissenfüllung gleichmäßig verstreichen
- Farbigen Ventilring nach unten drücken und durch Abpumpen die Form fixieren

Anlegevorgang

Unterarm in der Schale platzieren

- Handgriff mit der Hand fest umschließen (Bild 2)

Bild 2

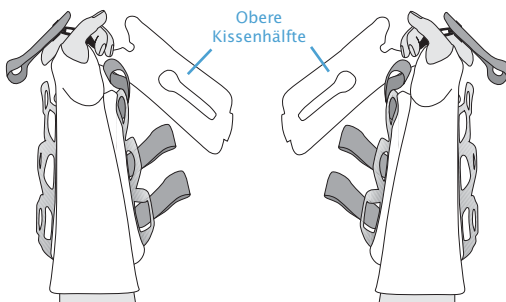


Für linken Arm

Für rechten Arm

Schalen schließen

- Obere Kissenhälfte in die Schale einlegen (Kissenränder muss sich immer unter der Schale befinden)
- Als erstes Handgelenkgurt durch die Gurtführungen ziehen und schließen (Bild 3)

Bild 3

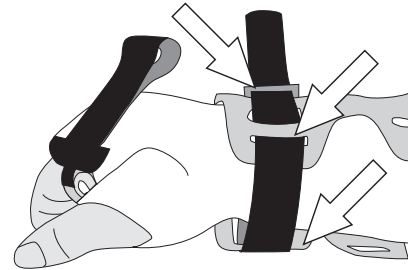


Exaktes Anpassen

Handgriff:

- Bei besonders großen oder kleinen Händen Schraube lösen und die Breite des Handgriffs einstellen, evtl. auch die Länge anpassen (ansonsten in der Grundeinstellung belassen) (Bild 4)

Bild 4

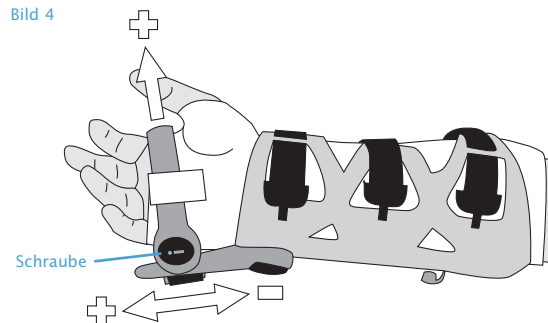

Kissen:

- Ventilring nach oben ziehen, damit das Kissen weich wird
- Kissenfüllung ggf. noch einmal anpassen
- Farbigen Ventilring nach unten drücken und durch Abpumpen die Form fixieren, dann Ventilkappe schließen
- Alle Gurte schließen und nochmals nachziehen

Problem & Lösung

Druckstellen

- Lockern Sie die Gurte etwas
- Oder passen Sie das Kissen noch einmal an (siehe Kapitel "Exaktes Anpassen")
- Gegebenenfalls führen Sie den gesamten Anlegevorgang noch einmal durch

Schmerz und starke Schwellung

- Lassen sich Schmerzen oder Druckstellen bei starker Schwellung nicht durch wiederholtes Anpassen beseitigen, gehen Sie sofort zum Arzt. Hier ist eine medizinische Nachsorge notwendig!

Reinigung & Pflege

Schale und Gurte

- Kann mit Seifenwasser gereinigt werden
- Bauteile und Schale dürfen keine Beschädigungen aufweisen

Armbezug

- Ist bei 60°C maschinenwaschbar

Vakuumkissen

- Kann mit Seifenwasser gereinigt werden

Verwendete Materialien

Hartschalen

- Thermoplastischer Kunststoff

Armbezüge

- Synthetischer Frotteeschlauch