

## Instrucciones de uso

# VACO®hand

### Introducción

VACO®hand es un sistema de tratamiento de fracturas que ha sido desarrollado para la terapéutica de las fracturas de radio. La seguridad y el confort del paciente están asegurados gracias al sencillo ajuste reversible del cojín de vacío. Esto, junto con una robusta carcasa en forma de reja, posibilita un tratamiento completo con un único sistema (desde la inmovilización pre- y posoperatoria, pasando por la fijación estable de la escayola, hasta una funcional ortesis).

### Posibilidades de uso

- Fracturas de radio
- Fracturas en el área cercana a la muñeca
- Torceduras en la muñeca
- Inmovilización y estabilización de la muñeca con completa movilidad de los dedos

### Tallas

Disponible en tres tamaños, pequeño, estándar y grande, para el brazo derecho como para el izquierdo.

### Información adicional

Si tiene más preguntas diríjase a su proveedor o directamente a OPED.

# OPED

**OPED GmbH**  
Medizinpark 1  
83626 Valley/Oberlindern  
Germany

Fon +49 (0)8024/60 81 82-10  
Fax +49 (0)8024/60 81 82-99  
mail@oped.de  
www.oped.de

**OPED España**  
Antonio Ortopedia S.L.  
Camino Albero 28  
29649 Mijas Costa/Malaga  
Spain

Fon/Fax +34 (0)952 47 04 08  
Movil +34 (0)678 94 45 81  
opedes@hotmail.com  
www.oped.es

Instrucciones de uso

# VACO®hand


## Preparación

- Colocar la funda para el brazo (tela)
- Procure evitar las arrugas al colocarlo

### Preparar la carcasa

- Abrir la correa de la carcasa
- Abrir bien las lengüetas

Ilustración 1

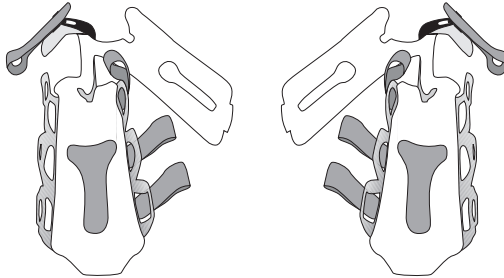

Para el brazo izquierdo

Para el brazo derecho

### Preparar el cojín


- Levantar la parte superior del cojín (ilustración 1)
- En caso de una distribución desigual, tirar del anillo coloreado de la válvula hacia arriba hasta que entre aire y el cojín se ablande
- El relleno del cojín debe ser uniforme
- Mover hacia abajo el anillo coloreado de la válvula y fijar la forma extrayendo el aire

## Proceso de colocación

### Colocar el antebrazo en la carcasa

- Asir firmemente la empuñadura con la mano (ilustración 2)

Ilustración 2

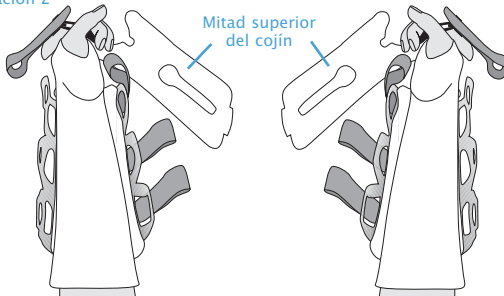


Para el brazo izquierdo

Para el brazo derecho

### Cerrar la carcasa

- Poner la parte superior del cojín en la carcasa (los bordes del cojín tienen que quedar siempre dentro de la carcasa)
- Tirar y cerrar en primer lugar la correa de la muñeca pasándola por las guías (ilustración 3)

Ilustración 3

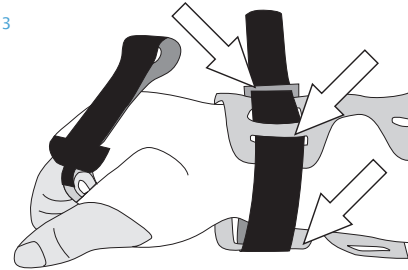


### Ajuste perfecto

#### Empuñadura:

- En manos particularmente grandes o pequeñas, aflojar el tornillo y adaptar el ancho de la empuñadura y, eventualmente, también el largo (en caso contrario dejarlo en el ajuste inicial) (ilustración 4)

Ilustración 4

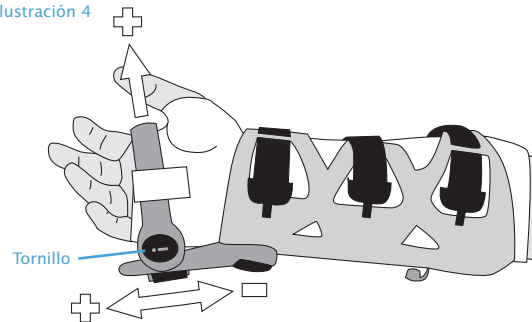

#### Cojín:

- Tirar del anillo de la válvula para que el cojín se ablande
- Dado el caso, ajustar nuevamente el relleno del cojín
- Presionar el anillo coloreado de la válvula y fijar la forma extrayendo el aire; cerrar el tapón de la válvula
- Cerrar todas las correas y apretar nuevamente

## Problema y solución

### Marcas de presión

- Afloje un poco las correas
- O bien ajuste de nuevo el cojín (véase el capítulo "Ajuste perfecto")
- Dado el caso, repita de nuevo el proceso de colocación desde el principio

### Dolor e hinchazón severa

- Si tras repetidos reajustes el dolor o las marcas de presión originadas por una hinchazón severa no remiten, acuda inmediatamente a su médico. En este caso es necesaria una revisión médica posoperatoria!

## Limpieza y cuidado

### Carcasa y correas

- Puede limpiarse con agua jabonosa
- Las piezas y la carcasa no deben presentar desperfectos

### Funda para el brazo

- Se puede lavar a máquina a 60°C

### Cojín de vacío

- Puede limpiarse con agua jabonosa